


Před aplikací

Po aplikaci

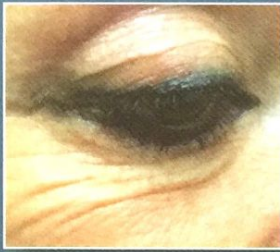

Technologie Prof. Doctor Fippi.com



SOFT SURGERY

MEDICINA ESTETICA CHIRURGIA NON ABLATIVA

Plexr

Plexr nejnovější generace nástrojů pro oftalmology

EDIM

Eastmeddevice s. r. o.

Tel.: +420 722 670 342, 777 015 500

E-mail: info@plexr.cz

Technologie Prof. Doctor Fippi.com

www.plexr.cz



# Plexr

## Co je to Plexr?

- **Není to laser**
- **Není to radiofrekvence**
- **Není to radiosklapel**
- **Je to plazmový generátor**

**PLEXR** nástroj, který jako jediný stačí pro veškeré zákroky v rámci neablativní chirurgie, byl vyvinut ve spolupráci s profesorem Giorgio Fippim, který je zároveň tvůrce jeho metodologie [www.fippi.net](http://www.fippi.net)

### Výhody

- Funkční princip Plazma
- Tři zcela bezdrátové, praktické a ergonomické nástroje s rozdílnou úrovní výkonu
- Konstantní výdej elektrické energie
- Pacientem neproudí elektrický proud, není uzemněno

### Využití

- Blefaroplastika
- Lifting vrchních a spodních víček
- Odstranění všech útvarů
- Odstranění vrásek okolo očí
- Cysty na očních víčkách
- Emangioma
- Seboreické cysty
- Xantelasmata
- Asymetrie víček
- Výrazové linie (čárový kód)
- Herpes simplex

## Dynamická neablativní blefaroplastika

Dokonalé výsledky bez jakýchkoliv rizik pro pacienta. Operatéroví umožňuje požadovat po pacientovi během zákroku, aby své oči otevíral a zavíral, díky čemuž snadno vidí, jak velká část záhybu mu ještě zbývá k ošetření.

Nedochází k žádnému řezání, přebytečná kůže se odstraní sublimací, aniž by docházelo k jakémukoli narušení orbikulárního svalu na víčkách.

Dynamická neablativní blefaroplastika je prováděna tak, že jsou zrohovatělé buňky eliminovány sublimací. Sublimací se rozumí jejich přímá změna z pevného na plynné tedy /nehmotné/ skupenství. Zákrok je prováděn pomocí 500 mikronových malých bodů, které přístroj Plexr vytvoří v určité přesné vzdálenosti od sebe, čímž je zajištěno, že víčka jsou dokonale plastická bezprostředně po zákroku.

V každém z těchto bodů dochází k sublimaci povrchových korneocytů, aniž by byla jakkoliv narušena bezalní lamina nebo docházelo ke krvácení, což je nejdůležitější, aniž by byla poškozena okolní tkáň nebo tkáň pod kůží.

Zákrok lze kdykoliv opakovat.

## Xantelasmata

Odstranění přístrojem Plexr nezpůsobuje zarudnutí očního víčka, nikdy nedochází ke krvácení.

Plexr odpařuje xantelasma v max. dvou sezeních, v případě 90% případů, zároveň oční víčko liftuje což je pacienty srdečně vítáno.

